


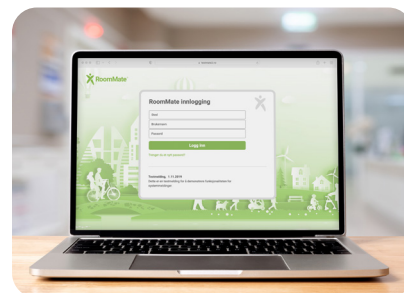

Serveroppdatering på roommate3.no

- Onsdag den 1. februar i tidsrommet 12.30 – 13.30
- Forventet nedetid er mindre enn 30 minutter
- Kontakt support@roommate.no for ytterligere informasjon.




Hovedfokus i denne oppdateringen:

- **Lyd vises i aktivitetsoversikten**
- **Markering av avstilt sensor i aktivitetsoversikten (sensor på pause når det er besøk på rommet)**

Aktivitetsoversikt med lyd

Aktivitetsoversikten ligger bak info-symbolet på tilsynssiden og viser blant annet grafiske fremstillinger av ulike typer bevegelse i boenheten. Vi har nå lagt til visning av lyd i den øverste grafikken. Bevegelse i seng vises med grønn farge mens lyd vises med blå farge. Standard innstilling viser bevegelse i seng og lyd samtidig,

og man kan også velge å se kun bevegelse i seng eller lyd, som grafikken viser nedenfor. Utslaget indikerer hvor høy lyden har vært, eller hvor mye bevegelse det har vært. Det er mulig å zoome inn på et tidsintervall for å se mer detaljer i grafikken.

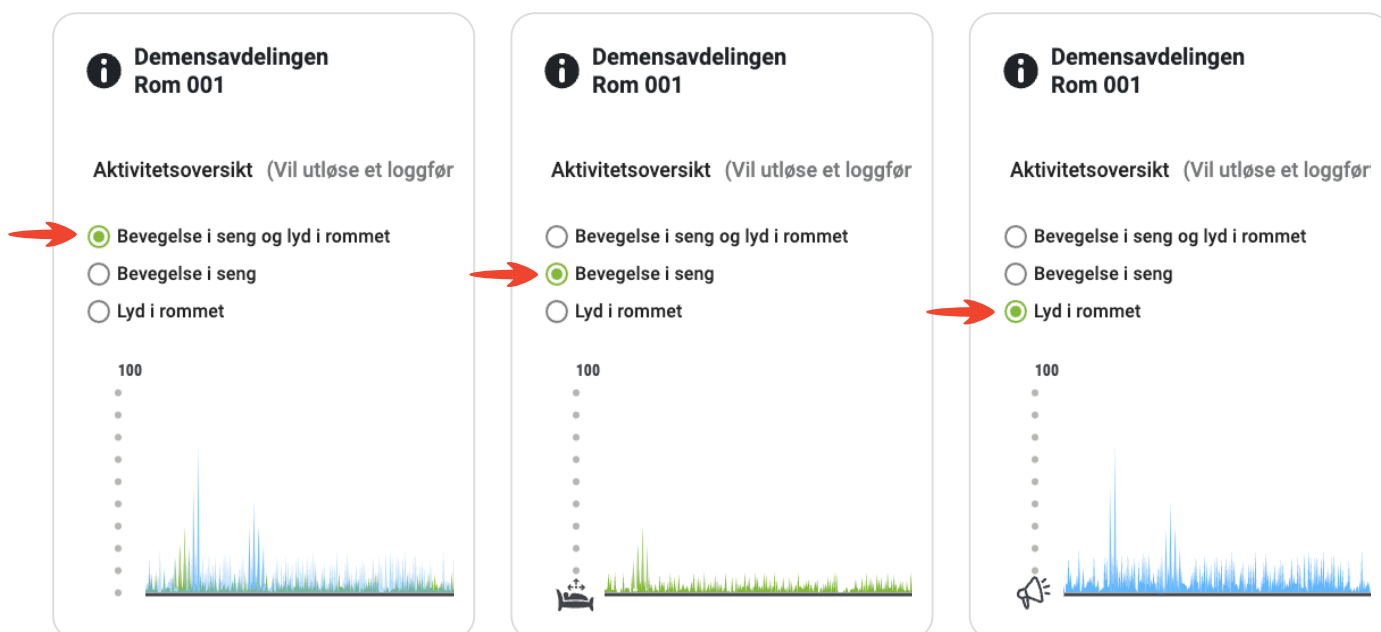

Eksempler: Utsnitt av den øverste grafikken i aktivitetsoversikten som viser bevegelse i seng (grønn farge) og lyd (blå farge)

Markering av avstilt sensor i aktivitetsoversikten

Når det er besøk i boenheten, for eksempel pleie, renhold eller familiebesøk, kan sensoren(e) avstilles (settes på pause) så lenge besøket varer. Når en sensor er avstilt vises ingen utslag i grafikken på aktivitetsoversikten.

Avstilling markeres nå med et grønt vertikalt felt og et sensorsymbol med strek over, og bredden på streken viser varigheten (kan leses av på tidslinjen nederst).



Sensoroppdatering

RoomMate sensorene vil bli oppdatert fortløpende etter serveroppdatering med en ny Linux-distribusjon som i tillegg til sikkerhetsoppdateringer, vil inkludere den nye funksjonaliteten Aktivitetsoversikt med lyd. Sensorene blir oppdatert i bolker over de kommende ukene.



I tillegg er det gjort flere forbedringer samt forberedelse for skalering og fremtidig funksjonalitet.